

Ein neues Seitenset im Communicator 5


In 8 Schritten erklärt von Marion Diliso

1. Vorbereitungen für das Seitenset




1. Schnell Menü wählen (Rechte Maustaste klicken)
2. Neues Seitenset erstellen
3. Entscheide dich für eine Gestaltung der Freihandseite oder **Rasterseite**

2. Rasterseite

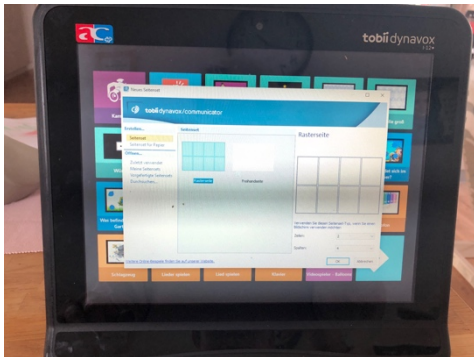


1. In diesem Beispiel nehmen wir die Rasterseite
2. Bestimme die Spalten und Zeilen
3. Bestätigen drücken

3. Felder bearbeiten

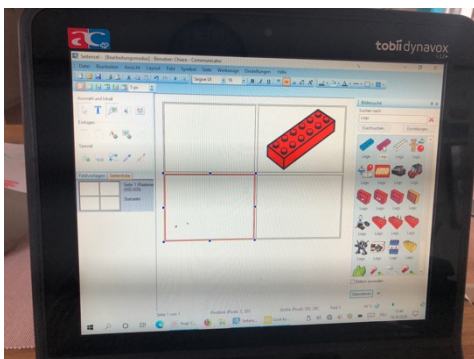

1. Wähle ein Feld aus (du siehst der Rahmen ist markiert)
2. Bild aussuchen: Im Suchfeld in der Spalte rechts → Bsp: Lego
3. Bild anklicken und unten das Häkchen setzen für «Bildtext anwenden» und Übernehmen

4. Sprache hinzufügen

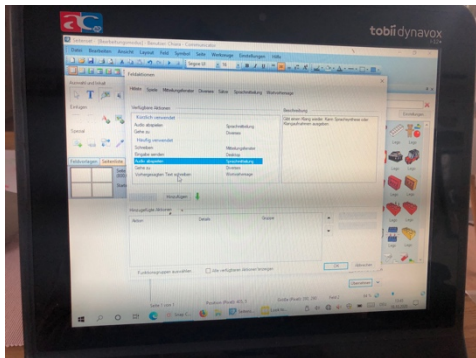


1. Feld anklicken
2. Rechte Maustaste drücken, dann öffnet sich ein Fenster
3. Feldaktion auswählen
4. Auswahl: Audio abspielen mit Doppelklick und **OK** anwählen
5. Im Fenster Feldaktion auch **OK** drücken

5. Wiederholen


1. Wiederhole Punkt 3 und 4 so oft bis nur noch ein Feld (am besten das links obere) übrigbleibt

6. Feldaktion «zurück»

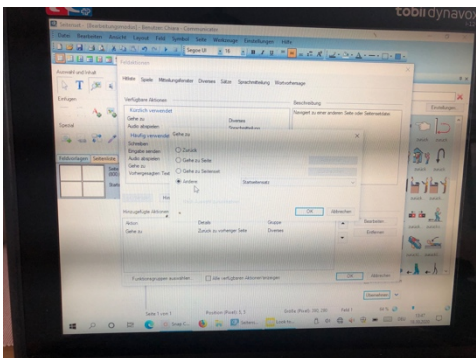


1. Wähle das letzte Feld aus
2. Füge ein Bild mit einem Pfeil ein
3. Rechte Maustaste → Feldaktion
4. Sprache hinzufügen «zurück»
5. **ACHTUNG** vor OK noch eine Funktion ergänzen
6. **GEHE ZU** Doppelklick → Andere wählen und Startseitenset anwählen
7. Mit OK bestätigen

7. Seitenset speichern

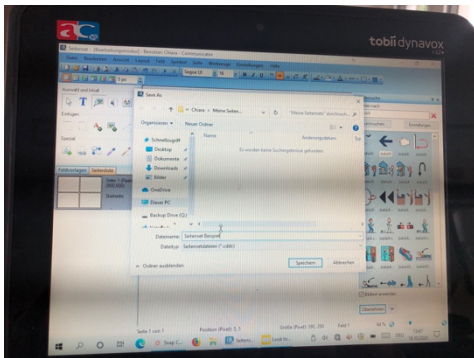

1. In der Leiste oben → Datei
2. Seite speichern unter
3. Ordner anlegen mit «Meine eigenen Seitensets»
4. Speichern

8. Seitenset einfügen

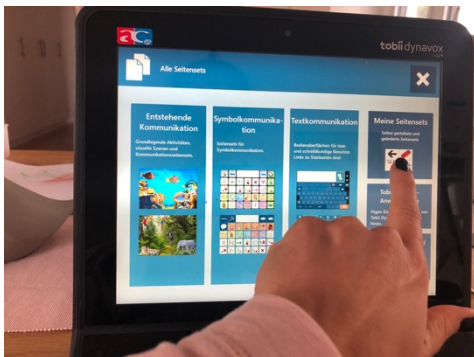

1. Datei → Gehe zu → Startseite
2. Rechte Maustaste und «Startseite bearbeiten» wählen
3. In der oberen Leiste «Seitenset hinzufügen»
4. Meine Seitensets wählen und das neue Seitenset anklicken
5. In der oberen Leiste «Zur Startseite hinzufügen» anklicken
6. Beenden und Fertig!

Quellenangabe: <https://de.tobii-dynavox.com/blogs/videothek/tobii-dynavox-communicator-5-eigene-rasterseite-erstellen>